


Ultra linge®



SAC OUVERTURE SOLUBLE ÉTANCHE

Collecte, transport & lavage du linge

Réduit les risques de contamination
Bande étanche aux bactéries

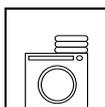

Rev1 - 02/2016

> Utilisation

Sac à ouverture soluble rouge à usage unique, destiné à la collecte, au transport et au lavage du linge contaminé ou souillé. Le sac fermé est placé directement en machine à laver, ce qui permet de réduire les manipulations et donc les risques de contamination.

> Mode d'emploi

Fermer le sac de linge à l'aide du lien soluble en faisant une seule boucle (ne pas nouer le sac et ne pas utiliser un autre type de lien). Introduire le sac de linge dans un sac doublure en toile ou en polyéthylène pour le transfert en blanchisserie. Placer le sac fermé directement dans la machine à laver. Ne pas toucher la bande ni le lien de fermeture avec du linge humide.


> Composition

Polyéthylène haute densité.

> Caractéristiques

Sac équipé d'un lien de fermeture et d'une bande étanche aux bactéries, tous deux solubles à l'eau froide. Ils se dissolvent en 1er cycle de lavage, libérant ainsi le linge. Bande étanche aux bactéries sécurisée (recouverte par le polyéthylène) afin que le linge humide à l'intérieur du sac ne l'affecte pas.

- Couleur : Rouge
- Dimensions : 45 x 76 cm
- Taille du soufflet : 13 cm
- Epaisseur : 15 µ (+/- 5 µ)
- Poids : 15 g environ

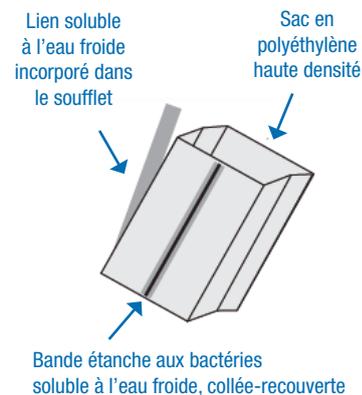

> Précautions d'emploi

Stocker à l'abri de l'humidité.
Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	200 pcs
Conditionnement	sachet de 50 pcs
Colis	4 sachets
Colis dimensions extérieures (cm)	41 x 18,5 x 14 H
Poids brut (kg)	3,3 kg
Code produit	291028

401445

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

GEH

Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

LINGE